


Linea Prodotti

		Dimensioni (mm)	Quantità
	R10	Ø12.67 × 10T	5 Ingots
	R20	Ø12.67 × 20T	3 Ingots

Colorazione disponibile

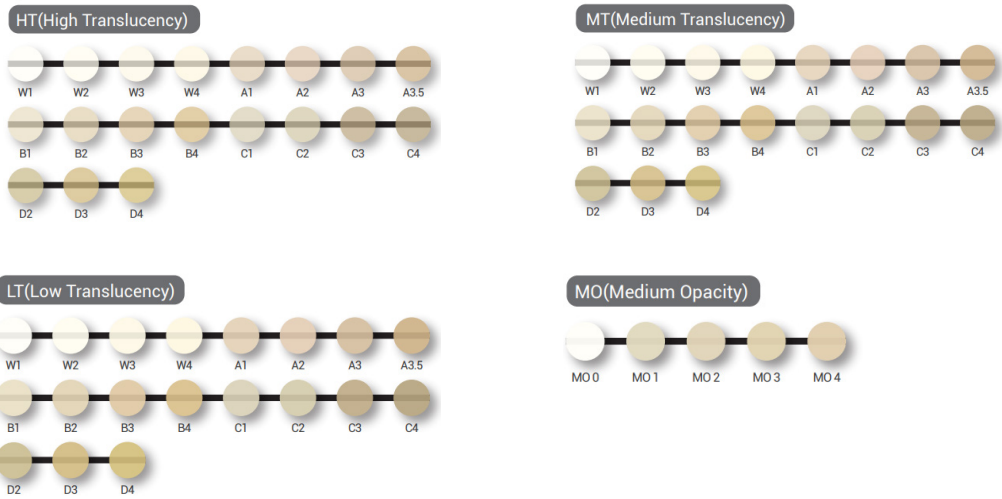

Programma di pressatura consigliato (DEKEMA press-i-dent)

Translucency	Size	Shade	Investment Ring (g)	Start Temp (B, °C)	Heating Rate (t n, °C / min.)	Max Temp (°C)	Holding time (min.)	Press duration	Press level							
HT	R10	W0, W1, W2, W3, W4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,B3,B4 W1, W2, W3, W4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	100	700	60	920	20	Auto 1	6							
MT			200			925										
LT																
HT	R20					925										
MT																
LT																
MO	R10	MO0, MO1, MO2, MO3, MO4	100			925	20									
	R20		200			930	40									

Per risultati ottimali, si prega di seguire il programma di cristallizzazione da noi consigliato.

Potrebbe esserci una piccola differenza tra la temperatura visualizzata e la temperatura effettiva di ciascun forno. Quando si utilizzano i lingotti Rosetta®SP, verificare che la tabella standard sopra indicata sia adatta al forno di pressatura utilizzato. In caso contrario, provare a trovare la temperatura di pressatura ottimale attraverso le seguenti procedure.
Se sono presenti tracce di piccole bolle sulla superficie del restauro pressato Ridurre la temperatura massima di 5~10 °C e riprovare la pressatura.
Se l'area marginale del restauro non è completamente formata Aumentare la temperatura massima di 5~10 °C e riprovare la pressatura. 2. Per la cottura, utilizzare perni di supporto arrotondati e stucco per il fissaggio dell'oggetto.

Maggiori info

 www.forniturecasotto.it



Forniture Dentali Casotto srl
Via C.Anconitano, 10
35123 Padova - Italia
ordini@forniturecasotto.it
049 8805239

Rosetta® SP


Disilicato di litio in blocchi da pressata



 **HASS** | Human-Aid System Supplier

Resistenza ed estetica superiore

Maggiore durezza

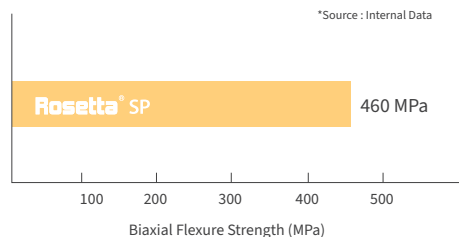

Estetica eccellente



Con una traslucenza naturale, Rosetta@SP può essere la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di ogni cliente che ricerca estetica e bellezza.

Semplice e sicuro



Dopo la pressatura, su Rosetta@SP rimangono pochissimi strati di reazione. Non è necessario applicare il liquido acido per la pulizia, garantendo così un processo semplice.

Ottima versatilità

Open Press system



Ampiamente compatibile con la maggior parte dei rivestimenti e ceramiche dentali.

Rosetta SP Ambassador



Indicazioni

	Inlays		Anterior Single Crowns
	Onlays		Posterior Single Crowns
	Veneers		3-Unit Anterior Bridge